

PROVTAGNINGSSINSTRUKTION

Salmonella i humanfaeces (avföringsprov)

Instruktionen gäller för provtagning med Transport Swabs Provtagningsculturet innehållande provtagningsstopps med hållare och en transporthylsa med transportmedium.

1. Märk transporthylsan med namn, personnummer och provtagningsdag
2. Fyll i följesedeln
3. Lägg toalettpapper eller en papperstallrik i toalettstolen så att avföringen blir lätt tillgänglig för provtagningen
4. Efter uträttat behov öppnas provtagningsförpackningen, se pil och text "Peel here"
5. Öppna "locket" på transporthylsan genom att vrida på den vita änden så att etiketten bryts. Håll röret så att vätskan inte rinner ut!
6. Ta ut provtagningsstoppen och doppa den i avföringen så att hela bomullsdelen kommer i kontakt med avföringen.
7. För ner topsen i transporthylsan så långt som möjligt. Hållaren på topsen ska fungera som tättslutande lock.
8. Lägg tillbaka transporthylsan i provtagningsförpackningen och bifoga följesedeln i det speciella kuvertets (Biosafe) remissficka
9. Posta provet eller lämna så att det inkommer till lab inom 24 timmar

INSTRUKTION



Skala bort lagret av plastfilm.



Ta bort korken från röret.



Ta ur svabben och samlar in provet.



Sätt in svabben i röret och förslut röret.

